

## MAAK ZELF JE PODOTRACK BLAUWDruk

Bedankt dat je Steunzool online hebt benaderd om jouw op maat gemaakte steunzool te krijgen. U volgt de stappen van deze instructielijst en zo krijg je jouw persoonlijke podotrack blauwdruk.


Een blauwdruk geeft ons informatie over uw drukverdeling van de voet, uw voetstand en uw voetype. Deze blauwdruk scannen wij in, en hierop ontwerpen wij jouw maat steunzool.

Wanneer u de blauwdruk van beide voeten heeft, kunt u de blauwdruk terugsturen in de retourenveloppe.

1. Zorg ervoor dat de podotrack vlak gestreken wordt. Haal vervolgens op de achterkant de plakker los en plak de achterzijde vervolgens vast op de vloer.



2. De middelste folie, dus de witte beschermfolie, moet verwijderd worden. Trek het er voorzichtig tussenuit en scheur het af.

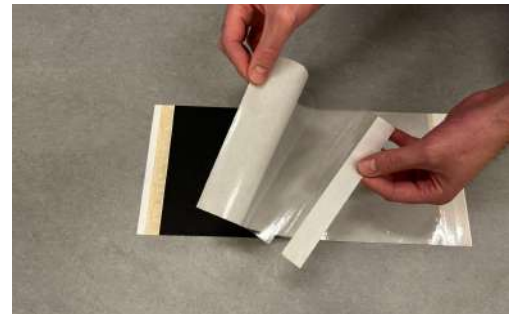

3. Plaats de bovenste doorzichtige folie terug op het carbonpapier. Zorg ervoor dat de podotrack strak op de vloer ligt en plaats een voet naast de podotrack.




4. **BELANGRIJK!** Zorg dat je dit in een keer goed uitvoert. Zet je voet in een keer midden op de podotrack en verdeel je gewicht gelijkmatig over beide voeten.




5. Maak met een potlood of pen een omtrek van je voet, houdt de pen/potlood strak langs je voet. (tip: vraag eventueel iemand anders om dit uit te voeren)




6. Haal jouw voet nu van de podotrack af. Trek voorzichtig de bovenste (doorzichtige) folie eraf en leg deze naast de podotrack.

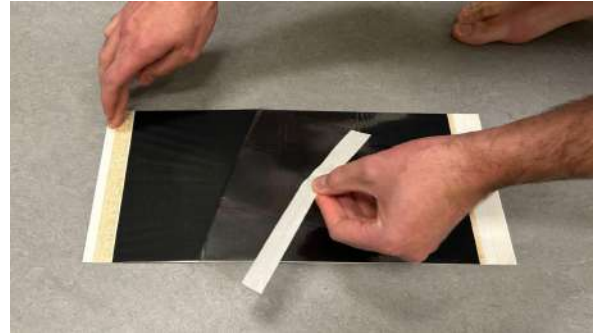

7. Verwijder het carbonpapier en scheur het voorzichtig af op het einde.

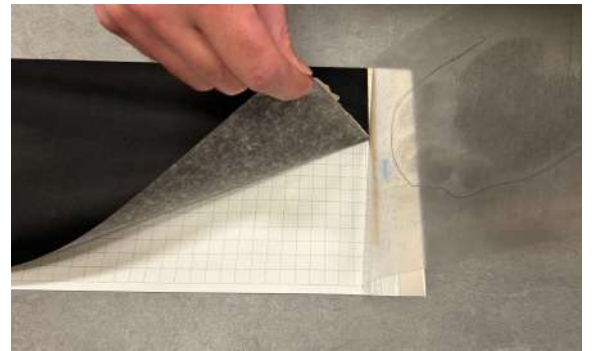

8. Leg de bovenste doorzichtige folie terug op het papier. Zorg ervoor dat er geen vouwen in zitten.

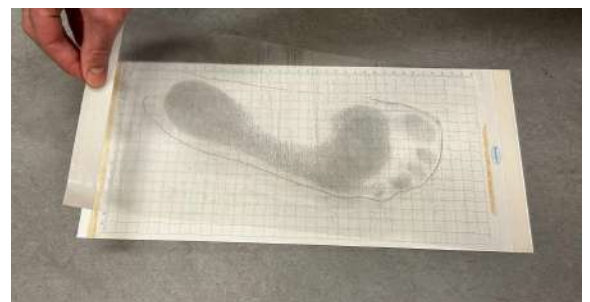

9. Strijk de bovenste folie aan met je hand. En Klaar!! u heeft uw blauwdruk.

